

ガスバーナー一体型の歯科用ユニットをご利用の先生方へお知らせとお願い

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度、豪雨及び地震の影響により、断水及び停電状態のエリアがございます。

同エリア内の歯科医院におかれましては、今後復旧作業が実施されることが予想されます。

ガスバーナー一体型の歯科用ユニットをご利用の先生方に

「停電時は必ず連続点火スイッチ及びメインスイッチをOFFにする」

「ガスバーナー周囲に燃えやすいものを置かない」

「ガスバーナーの上に布などをかぶせない」

「常に安全確認を行う」

旨の注意喚起を改めてお願いいたします。

なお、ガスバーナーの連続点火スイッチ作動中に停電し、復帰（再通電）すると再び着火するおそれのある機種が以下の通りございます。下記一覧の対象機種をご利用の先生方におかれましては、一層のご注意をいただきますようお願いいたします。

■対象機種（右カッコ内は発売期間）

「シグノ S 2 1 (TU-91)」	(1993 年～1998 年)
「シグノ 2 0 3 (TU-89)」	(1990 年～1994 年)
「サーパス(TU-88)」	(1988 年～1994 年)
「シグノグランド 9 0 (TU-87)」	(1986 年～1993 年)
「シグノグランド(TU-86)」	(1986 年～1992 年)
「シグノ(TU-80)」	(1984 年～1988 年)
「アドニス(TU-66)」	(1982 年～1987 年)