

REMARQUE – Avant d'utiliser Lubrina 2

Merci d'avoir acheté Lubrina 2, dispositif d'entretien de pièces à main dentaires.

Lubrina 2 est conçu pour l'entretien des pièces à main dentaires. N'utilisez pas Lubrina 2 dans un autre but que celui de lubrifier et rincer les pièces à main dans le cadre de leur entretien.


* Le terme « rinçage », tel qu'il est employé dans ce manuel, correspond à l'élimination et l'évacuation des débris de coupe et des corps étrangers situés à l'intérieur de la pièce à main.

Configuration de l'unité principale


Installez l'unité principale en veillant à laisser un espace suffisant autour, tel qu'indiqué ci-dessous.

Il est nécessaire de laisser un espace de chaque côté afin de pouvoir remplacer les vaporisateurs. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le conduit d'air sont connectés à une distance suffisante l'un de l'autre et qu'ils ne sont pas sous tension.

■ Vue de face

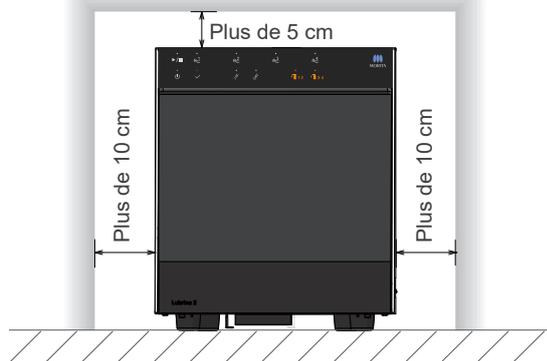

■ Vue de dessus

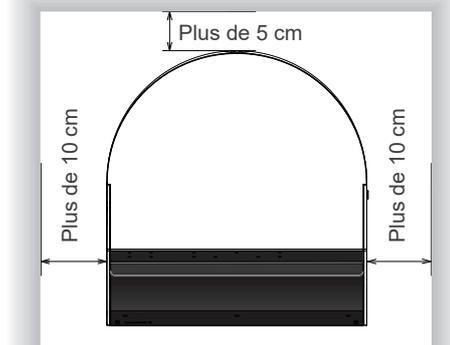

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser le dispositif à proximité d'une flamme nue ou à tout endroit où il sera soumis à des températures élevées. Les vaporisateurs installés pourraient s'enflammer ou exploser.
- Installer l'unité principale dans un endroit correctement ventilé. Aérer régulièrement. Inhaler des vapeurs peut être dangereux pour votre santé.
- Ne jamais positionner le dispositif dans un endroit concave ou couvert. Les gaz inflammables contenus dans les vaporisateurs pourraient s'accumuler.

⚠ MISE EN GARDE

- Placez le dispositif sur une surface plane et stable afin qu'il ne bascule pas ou ne chute pas.

Réglages initiaux des modes de maintenance

- Lubrina 2 est équipé de deux modes de maintenance. Un mode est recommandé pour chaque type de pièce à main, tel qu'indiqué ci-dessous :

Mode 1 : Pièces à main à turbine à air

Mode 2 : Accessoires de pièce à main à moteur

* Pour plus d'informations sur le type de pièce à main et le mode à utiliser, reportez-vous à la page 9 « 5.2.1 Mode recommandé » dans les instructions d'utilisation jointes.

- Les réglages initiaux du Mode 1 correspondent aux touches 1 et 2 et ceux du Mode 2 aux touches 3 et 4.

* Pour modifier les réglages de chaque mode, reportez-vous à la page 26 « 7.3.4 Modification du mode d'entretien » dans les instructions d'utilisation jointes.

Touches 1 & 2

Réglage initial : Mode 1

Recommandé pour les pièces à main à turbine à air et les détartreurs à air.

Touches 3 & 4

Réglage initial : Mode 2

Recommandé pour les accessoires de pièce à main à moteur (pièces à main droites et contre-angles).

