


1 Tri Auto mini einschalten: Drücken Sie den Hauptschalter.

Die Standby-Anzeige erscheint.

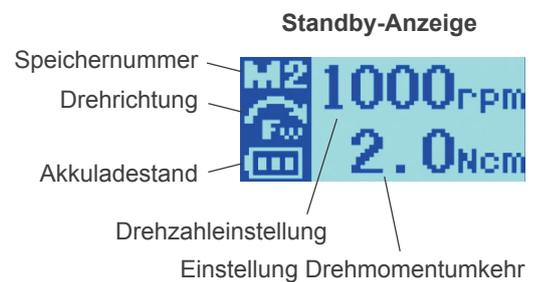

2 Speichernummer auswählen: Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste.

* Sechs Speicherpositionen sind verfügbar.

Im Folgenden sind die Werkseinstellungen aufgelistet.


Einstellung	Speicherposition		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Drehzahl in rpm (=U/min)	400	400	250
REV.TORQUE (Drehmomentumkehr, in Ncm)	1.0	0.8	0.6

3 Motor starten: Drücken Sie erneut den Hauptschalter.

Die Drehmoment-Anzeige erscheint.

* Halten Sie den Hauptschalter gedrückt, wenn Sie den Motor starten, läuft dieser nur, solange der Schalter gedrückt wird und stoppt, wenn dieser losgelassen wird.

Drehmoment-Anzeige

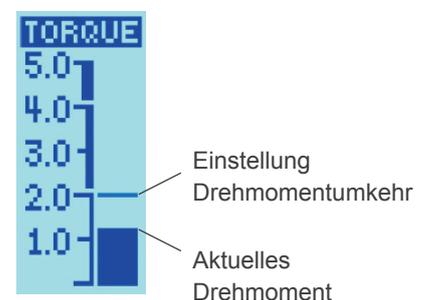

4 Motor anhalten: Drücken Sie erneut den Hauptschalter.

Die Standby-Anzeige erscheint erneut.

